


1. Sie haben die Datei «FluroTest_V1.00_Rxxx.bin» (xxx = Versionsnummer) entweder von uns via email erhalten, oder von unserer Homepage (<https://www.arovet.ch/produkte/vcheck-v200/>) heruntergeladen. **ACHTUNG:** Wenn Sie die Datei von unserer Homepage herunterladen, müssen Sie die Datei zuerst entpacken (z.B. mit WinZip, oder mit der internen Windows 10 funktion) damit Sie die Datei mit der Endung .BIN erhalten, andernfalls wird die Datei vom update nicht erkannt.
2. Update Software – Datei auf einen USB – Stick kopieren. (bitte nur jeweils eine Update-Datei laden)

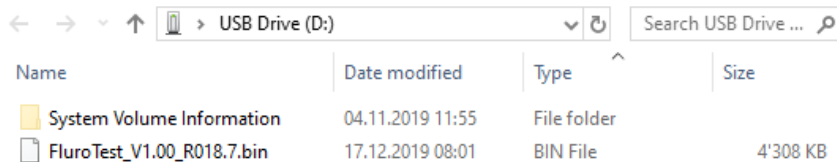

3. **Gerät einschalten** (3 sekunden Power-Schalter betätigen). **USB – Stick einstecken** und **Verbindung prüfen** / USB – Symbol erscheint unten in der Mitte (wenn das Symbol nicht erscheint, bitte anderen Stick / FAT32 verwenden)



4. Navigieren Sie im Hauptmenu: **[Administrator]**, **passwort eingeben** (default: 0000), mit **[OK]** bestätigen, Menüpunkt **[aktualisieren]**, dann **[SW Update]**, die nachfolgende Frage (S/W Update?) mit **[OK]** bestätigen. Bitte auf das ende des Updates warten und am Schluss mit **[OK]** bestätigen, das Gerät wird sich nun selbständig ausschalten.



5. Schalten Sie das Gerät nun wieder ein und überprüfen Sie im Menu unter **[Administrator]**, **passwort eingeben** (default: 0000), mit **[OK]** bestätigen, Menüpunkt **[info]**, dann **[Version anzeigen]**. Wenn die angezeigte **S/W Version** der aktuellen Software entspricht, war der Update-Prozess erfolgreich.

