


1. Vous avez reçu le fichier «FluroTest\_V1.00\_Rxxx.bin» (xxx = le numéro de la version) par mail ou vous l'avez téléchargé de notre page d'accueil (<https://www.arovet.ch/fr/produkte/vcheck-v200/>). **ATTENTION** si vous téléchargez le fichier de notre page d'accueil, il doit en premier être décompressé (i.e. avec WinZip, ou avec la fonction interne Windows 10) pour obtenir un fichier avec la finition BIN, pour que l'update le reconnaisse comme lisible.
2. Mettre à jour le logiciel – copier le fichier sur une clé USB (ne mettre qu'un fichier sur la clé).

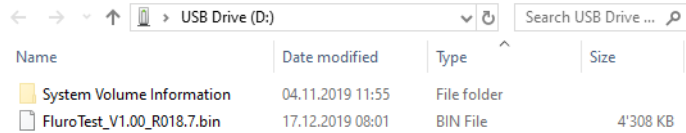

3. **Allumer l'appareil** (appuyer 3 sec sur l'interrupteur d'alimentation) insérer la clé **USB** – **et contrôler** la connexion / le symbole USB apparait en bas au milieu de l'écran (s'il n'apparait pas utiliser une autre clé/FAT32)



4. Naviguer dans le menu principal : **[Administrateur]**, insérer le mot de passe (par défaut : 0000), confirmer avec **[OK]**, élément du menu **[mis à jour]**, puis **[mis à jour logicielle]**, la prochaine question (S/W Update?) confirmer avec **[OK]**. Attendre la fin de la mise à jour et à la fin confirmer **[OK]**, l'appareil s'éteint alors automatiquement



5. Allumer à nouveau l'appareil et contrôler dans le menu **[Administrateur]**, insérer le mot de passe (par défaut 0000), confirmer avec **[OK]**, sous le point menu **[info]**, **[vérification de la version]**. Si la **version S/W** affichée correspond au logiciel actuel, le processus de mise à jour a été effectué avec succès.

